

گروه هدف

کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و بیماران مسن

کاربر مجاز

دندانپزشک

ترکیب شیمیایی

اطلاعات کیفی: متاکریلات‌های الیگومری، HEMA، کامفورکینون

اطلاعات کمی: ۹۸٪ متاکریلات الیگومری و ۲٪ افزودنی

خواص کلینیکی

این محصول یک ماده چسبنده با قابلیت باند شدن به دنتین و انامل دندان ایجاد شده است و می‌تواند پس از کیور شدن با نور، باند بین کامپوزیت و نسج دندان را بهبود بخشد.

موارد استفاده

از این محصول برای ایجاد باند مؤثر کامپوزیت‌ها به دنتین و انامل استفاده می‌شود و باندینگ بین سمان‌های پرکننده گلس‌آینومر و پرکننده‌های کامپوزیت را بهبود می‌بخشد.

موارد منع مصرف

این ماده حاوی متاکریلات است و برای بیماران با حساسیت به متاکریلات نباید استفاده شود.
از این محصول نباید در ناحیه نزدیک پالپ استفاده شود.

روش استفاده

نکات پیش از استفاده:

۱. حفره را طبق روش متداول درمان آماده کنید.
۲. بسته به موقعیت، خمیر کلسیم هیدروکساید (EDGE Calcid) یا یک سمان زیرسازی (بیس و لاینر) باید در حفره‌های عمیق قرار داده شود.
۳. بر اساس تکنیک توتال‌اج، انامل را اچ کرده و پس از شست و شو خشک کنید. توجه! سمان گلس‌آینومر نباید اچ شود.

دستورالعمل استفاده:

۱. پس از خشک شدن حفره آماده‌شده، ۱ تا ۲ قطره از EDGE Bond لایت‌کیورشونده را بر روی پد بریزید و بلافاصله درپوش بطری را ببندید.
۲. با استفاده از براش یا پلت‌های فوم، یک لایه نازک روی دندان قرار دهید.
۳. مواد اضافی را با براش بردارید.
۴. لایت‌کیور با نور در طول موج ۴۵۰ نانومتر و شدت ۵۰۰ mW/cm² به

مدت ۱۵ ثانیه انجام شده و منبع نوری به‌طور مداوم بررسی شود.

هشدار

این ماده حاوی متاکریلات است. افراد با حساسیت به متاکریلات‌ها نباید در تماس با این ماده قرار گیرند.

عوارض جانبی

عوارض جانبی نامطلوب و خطرات استفاده بیش از حد گزارش نشده است.

واکنش‌های جانبی

واکنش این محصول و متابولیت‌های آن با سایر محصولات پزشکی، فرآورده‌های دارویی و مواد دیگر گزارش نشده است.

نگهداری

در محیط خشک، خنک (۲۲-۵°C) و دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

پس از استفاده درپوش بطری را به‌خوبی ببندید.

طول عمر

طول عمر این محصول ۳ سال است.

از مصرف آن پس از تاریخ انقضا خودداری کنید.

امحا

ماده استفاده نشده می‌تواند کیور شده و با ضایعات خانگی دور ریخته شود.
ماده کیور نشده باید به‌عنوان ضایعات متاکریلات امحا شود.

سایر ملاحظات

دستورالعمل‌های کاری و اقدامات احتیاطی که در این دستورالعمل ذکر شده است، الزاما باید رعایت شود. علی‌رغم پیروی از این دستورالعمل‌ها، در صورت پیشامد هرگونه عارضه جانبی و یا مورد نامطلوب، مراتب را به سازنده یا نماینده قانونی آن اطلاع داده و شرایط پیش‌آمده را تا حد امکان به‌طور دقیق شرح دهید.