

گروه هدف

کودکان، نوجوانان، بزرگسالان و بیماران مسن

کاربر مجاز

دندانپزشک

ترکیب شیمیایی

پودر: کلسیم آلومینیوم فلوروسیلیکات، پلی اکریلیک اسید، اکسید آهن
مایع: تارتاریک اسید، آب

خواص کلینیکی

این محصول یک سمان گلس آینومر است که چسبندگی به عاج و مینا دارد.

موارد استفاده

چسباندن روکش، بریج، اینله، آئله، پست و باند های ارتودنسی

موارد منع مصرف

در نزدیکی ناحیه پالپ استفاده نشود.
در صورت حساسیت به مواد تشکیل دهنده نیز استفاده نشود.

روش استفاده

عاج، مینا و سطح فلز را کاملاً تمیز و خشک کنید. پودر را پیش از استفاده تکان دهید. محصول را در دمای اتاق (۲۳°C - ۱۵) استفاده کنید. پودر و مایع روی پد اختلاط اضافه شده و مخلوط شوند. برای یک پیمانه پودر از دو قطره مایع استفاده کنید. زمان مخلوط کردن ۳۰ ثانیه است. از این محصول در دمای اتاق به مدت یک دقیقه و بیست ثانیه می توان استفاده نمود و پس از ۳ دقیقه در داخل دهان ست می شود. دمای بالاتر، زمان کارکرد را کوتاه تر می کند. برای بریج و کراون، مطمئن شوید که مقدار اضافی ماده وجود ندارد. همچنین جهت جریان یابی مناسب ویسکوزیته ماده بالا نباشد. از آلوده شدن با آب یا بزاق ضمن ست شدن جلوگیری کنید.

هشدار

در زمان کار از عینک یا شیلد محافظ استفاده نمایید و اجازه ندهید مواد پخش شده در محیط با چشم تماس پیدا کند. در صورت تماس، محل را بلافاصله با آب فراوان بشویید.

عوارض جانبی

اگر این محصول پزشکی به درستی تهیه و استفاده شود، عوارض جانبی بسیار نادر است. همچنین تاثیر جانبی با سایر داروها گزارش نشده است. اگر ضخامت عاج باقیمانده کافی نباشد یا مقدار سمان اضافی زیاد باشد، ممکن است التهاب پالپ رخ دهد. اثرات جانبی ناخواسته این محصول در صورت استفاده طبق دستورالعمل بسیار محدود است. در صورت مشاهده هرگونه واقعه ناخواسته یا هرگونه عارضه جانبی مراتب را به شرکت سازنده اطلاع دهید.

نگهداری

در محیط خشک، و در محدوده دمایی (۲۲°C - ۰) نگهداری شود.

طول عمر

طول عمر این محصول ۳ سال است.
از مصرف آن پس از تاریخ انقضا خودداری کنید.

امحاء

ماده استفاده نشده را مطابق دستورالعمل امحاء مواد شیمیایی دور بریزید.

سایر ملاحظات

دستور العمل های کاری و اقدامات احتیاطی که در این برگه راهنما ذکر شده است، الزاماً باید رعایت شود. علی رغم پیروی از این دستورالعمل ها، در صورت پیشامد هرگونه عارضه جانبی و یا مورد نامطلوب، مراتب را به سازنده یا نماینده قانونی آن اطلاع داده و شرایط پیش آمده را تا حد امکان به طور دقیق تشریح کنید.